

Skin Wizard

Для Вашей красивой кожи



Клиенты



Анализ



Просмотр



Имя

Дата

Все группы

Оба пола

Контакты

Недавний анализ

Регистрация клиента



Имя

Фамилия

Возраст

10лет

Пол



Email

Email

Группа

Не определена

Тип кожи

Азиатский

Заметка

OK

Отмена

Возраст

Возраст

10лет

20лет

30лет

40лет

50лет

60лет

Диагностик сегодня № : 0

Всего диагностик № : 0

0 Элементы

Редактировать

Задать группу

Удалить

Новый клиент





Клиент без регистрации



30лет



Влажность Точка измерения

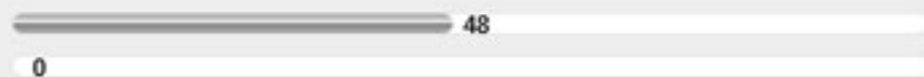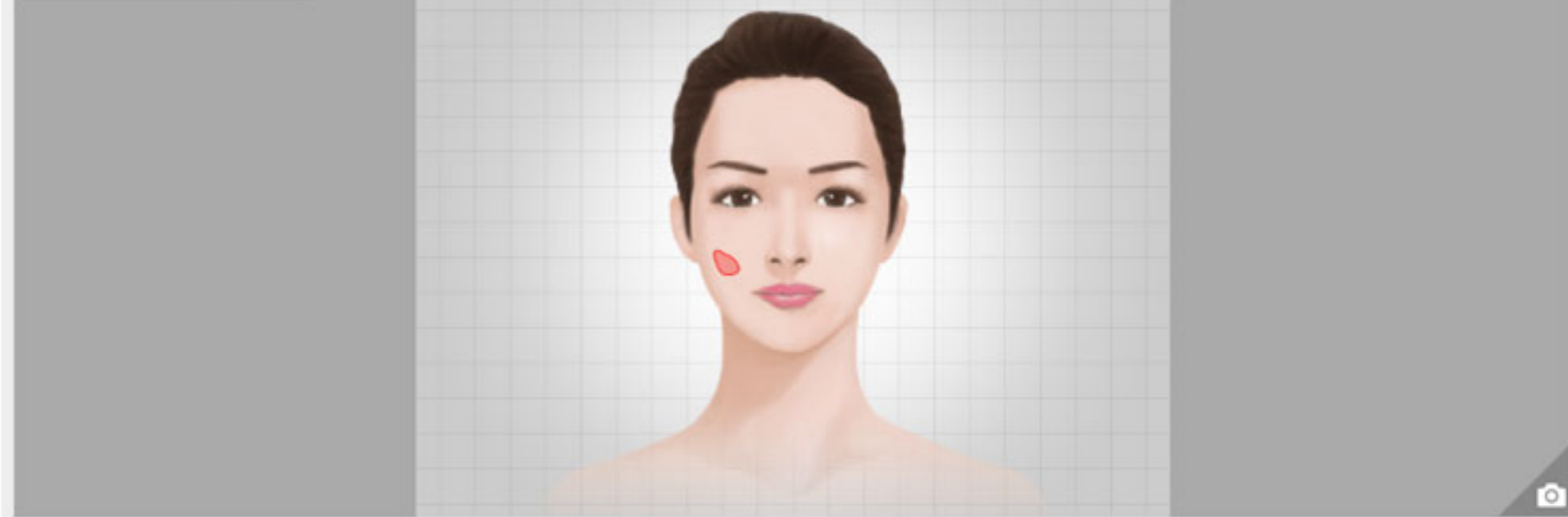

В среднем Клиент



В среднем Клиент



Результаты "Увлажнение / Эластичность" Перед анализом

Недостаточная увлажненность может сделать Вашу кожу менее эластичной и ускорить старение.

При низком уровне влажности уменьшается сияние макияжа.


Красота и мягкость кожи зависят от увлажненности. Кожа с достаточным уровнем влажности эластичная и молодая.



Клиент без регистрации




30лет

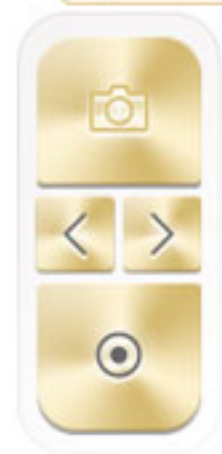

Анализ завершен

Увлажнение

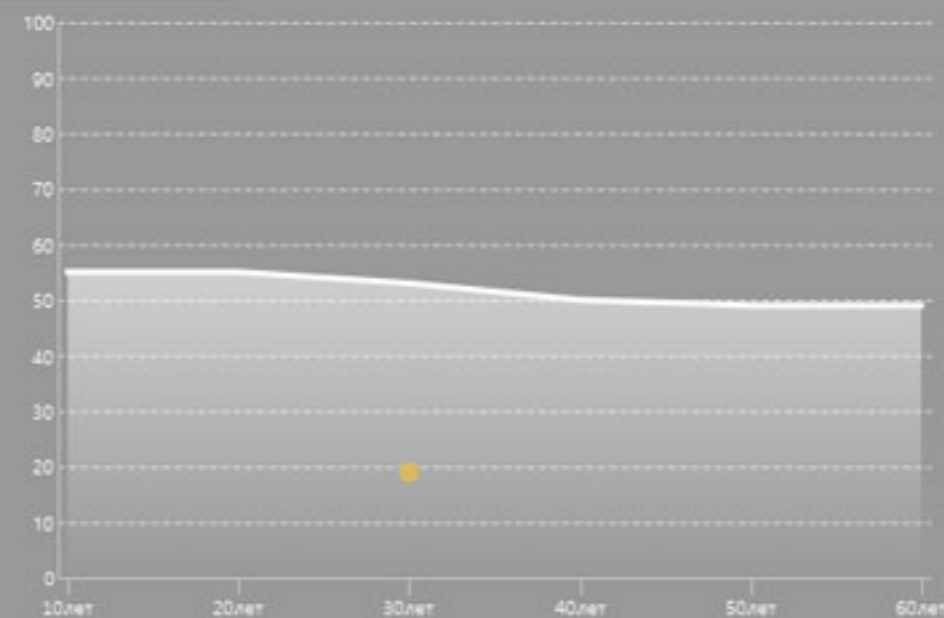


48

19

В среднем Клиент

Эластичность

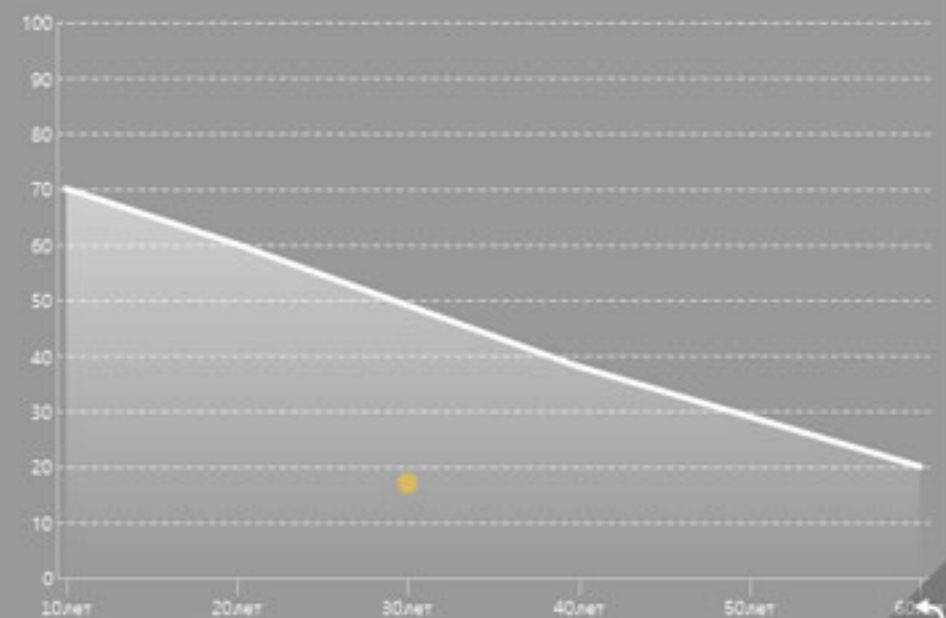

44

17

В среднем Клиент

Результаты "Увлажнение / Эластичность" Сухая / Низкая

Недостаток влаги по сравнению с той же возрастной группой.

Кожа ощущается слегка стянутой, природная защитная плёнка становится тонкой из-за недостатка влаги. Увлажнить сухую кожу можно с помощью минеральной воды или правильного питьевого режима.

Из-за недостаточной эластичности текстура кожи становится рыхлой, поры расширяются.






Клиент без регистрации



30лет

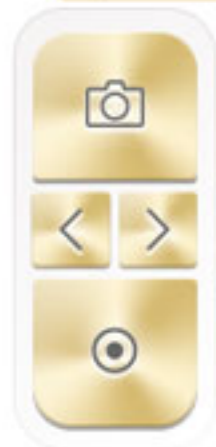

x30



U Зона

Снимок



0


59

В среднем Клиент

Анализ

T Зона

Снимок

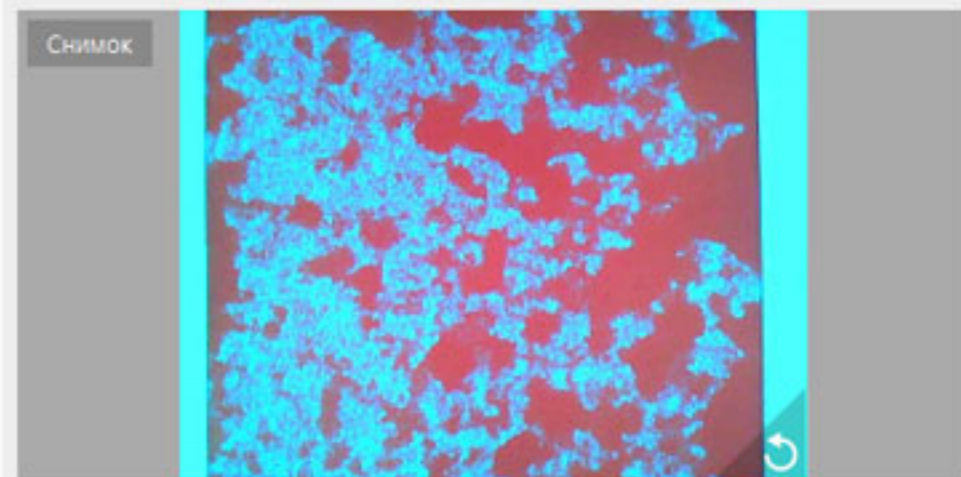


0

59

В среднем Клиент

Снимок

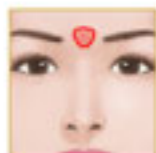

Результаты "Жирность" Тип Кожи : Перед анализом

Когда поры блокируются кожным салом и омертвевшими клетками кожи, бактерии размножаются. Это вызывает угревую сыпь и появление комедонов.



Клиент без регистрации

Gender selection: Male (selected), Female

Age selection: 30 лет

Ethnicity selection: Европейский



U Зона

Анализ завершен

59

1

В среднем Клиент

Анализ

T Зона

Анализ завершен

59

62

В среднем Клиент

Снимок



Результаты "Жирность" Тип Кожи : Комбинированная

Смешанный тип кожи, когда участки с избытком кожного сала комбинируются с участками с его недостатком.




Клиент без регистрации



30лет

Европейский

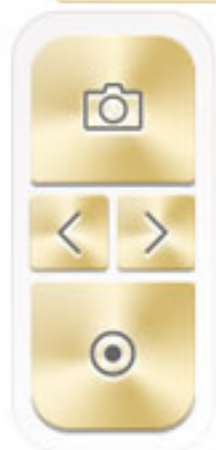

x30



Поры
✕

Поры Сравнение с образцом

Кожа клиента

Нормальное

←
→

OK

Сравнить



Поры Результаты Перед анализом



Толстый слой кожного сала, много пыли и недостаток влаги - основные причины расширения пор.

Причины увеличения размера пор - чрезмерное выделение кожного сала и старение кожи. Кожное сало откладывается в порах, остаётся в них и закупоривает просвет сальных желёз, что приводит к образованию черных точек. Затем в пору попадают бактерии и вызывают инфекционно-воспалительный процесс. Именно так формируется прыщ или угорь.




Клиент без регистрации



30лет



x30

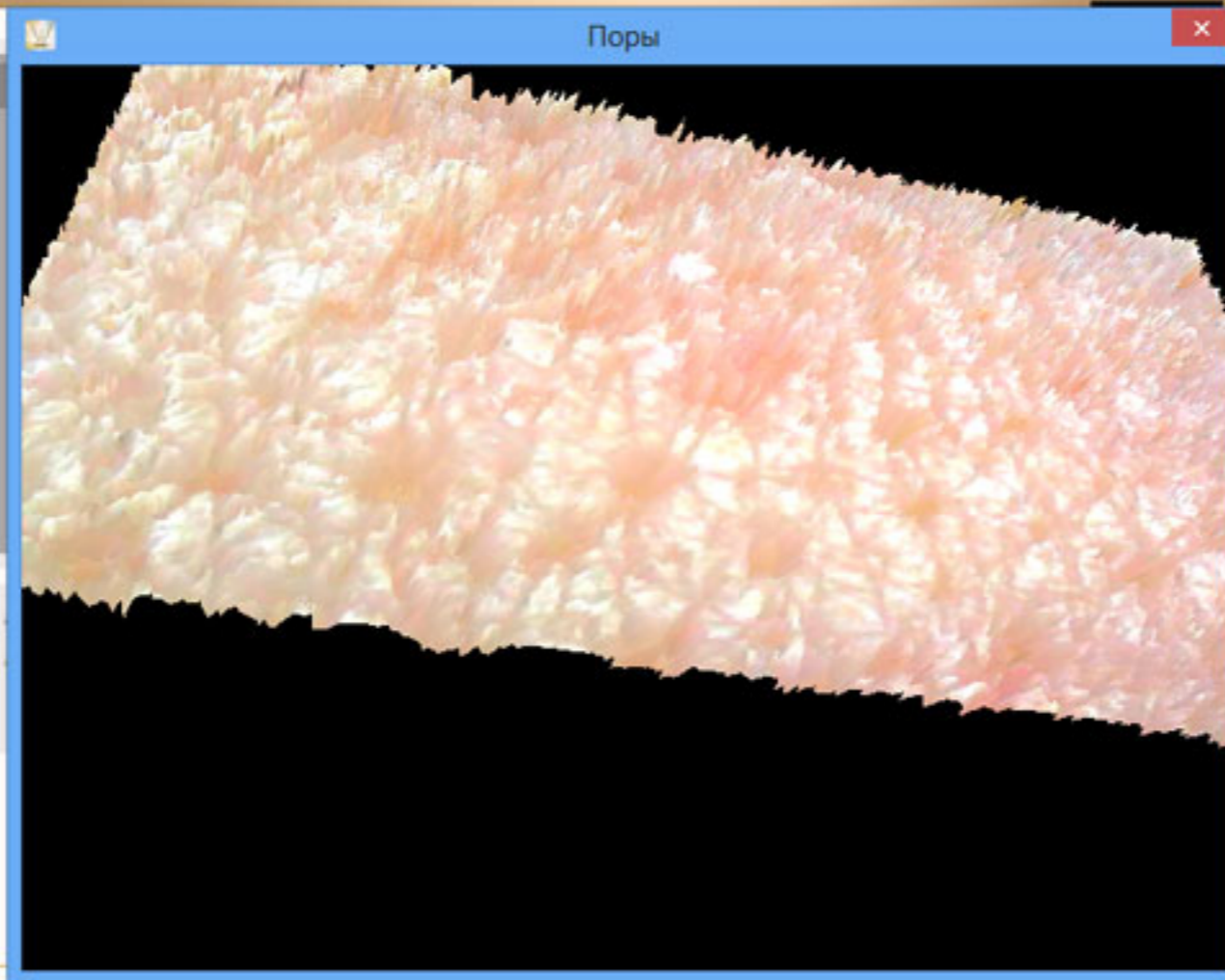

Поры Результаты **Хорошее**



Ровная текстура кожи. Поры слегка видны.

Увлажните кожу, используя средство, которое содержит меньше масла.






Клиент без регистрации



30лет

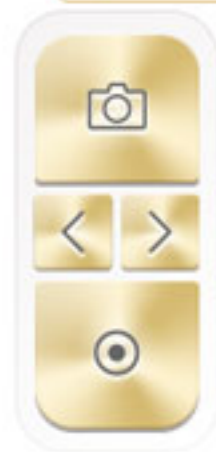

x30



Анализ завершён



32

23

В среднем Клиент

Анализ

Снимок

30

Сравнить

Пигментация Результаты **Хорошее**

Небольшое количество слабо заметных пигментных пятен на коже.

Предотвратите появление пятен, используя солнцезащитные средства, блокирующие проникновение ультрафиолетовых лучей. Кроме того, подберите дневной крем, основу под макияж и тональное средство, которые обладают функцией блокировки ультрафиолетовых лучей.





Клиент без регистрации

Gender selection: Male (selected), Female. Age: 30 лет

Ethnicity: Европейский

Control panel with camera icon, navigation arrows, a central button, and a device icon with 'x30' magnification and connectivity icons.

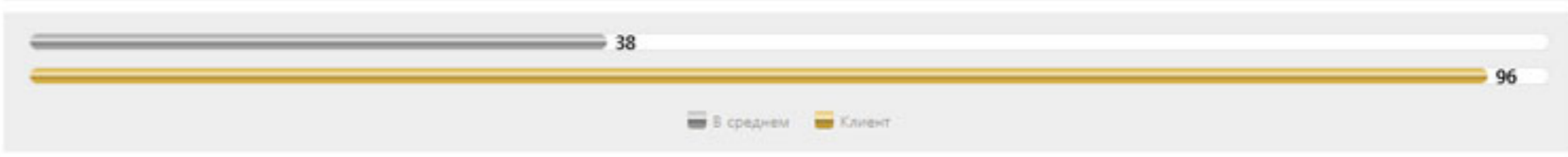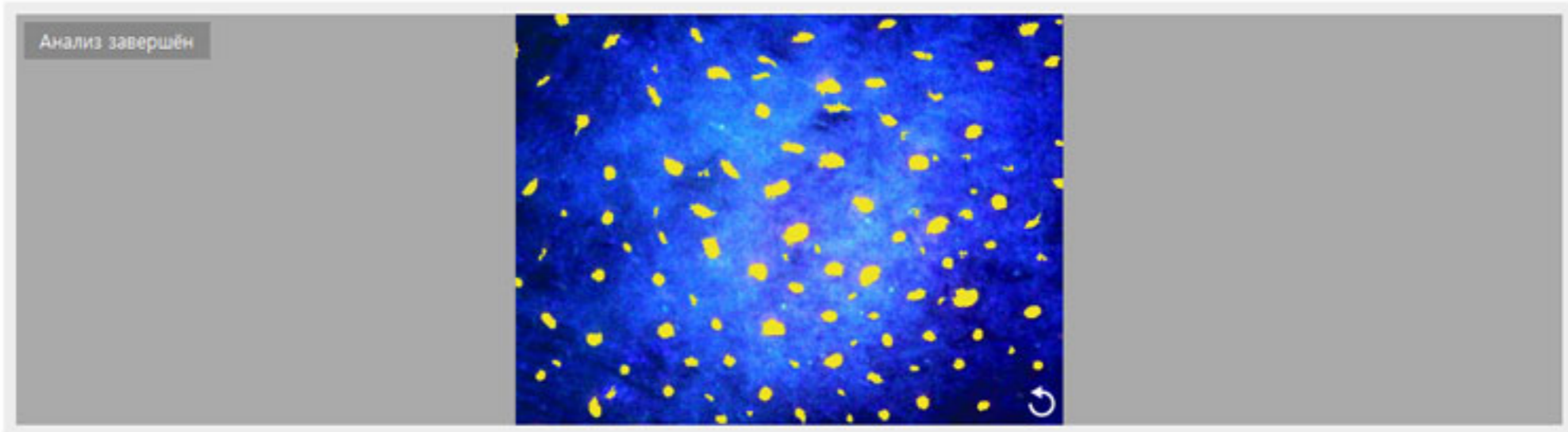

Buttons: 'Анализ', 'Снимок', '3D', 'Сравнить'



Акне Результаты *Интенсивный уход*



Кожа с избытком кожного жира - причина загрязненности лица и появления расширенных пор с чёрными точками. Очищайте Т-зону с помощью скрабов, предварительно раскрыв поры с помощью пропаренного полотенца. Если вы наносили макияж, очистите кожу два раза.



Клиент без регистрации



30лет



x30



Анализ завершён



20

51


В среднем Клиент

Анализ

Снимок

3D

Сравнить

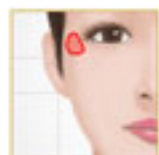**Морщины Результаты** **Необходимый уход**

На внешних уголках глаз видны длинные, небольшие морщины. Когда человек меняет выражение лица, они становятся явными.

Используйте солнцезащитное средство, чтобы избежать воздействия ультрафиолетовых лучей, которые способствуют снижению влажности кожи и старению.



Клиент без регистрации



30лет

Европейский

x30



Снимок



19

0

В среднем Клиент

Анализ

Снимок

3D

Сравнить

Чувствительность Результаты [Перед анализом](#)


От физических и химических воздействий тонкая и чувствительная кожа легко краснеет, проявляются капиллярные сосуды.



Клиент без регистрации




30лет

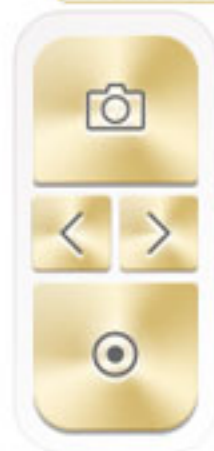

x30



Анализ завершён

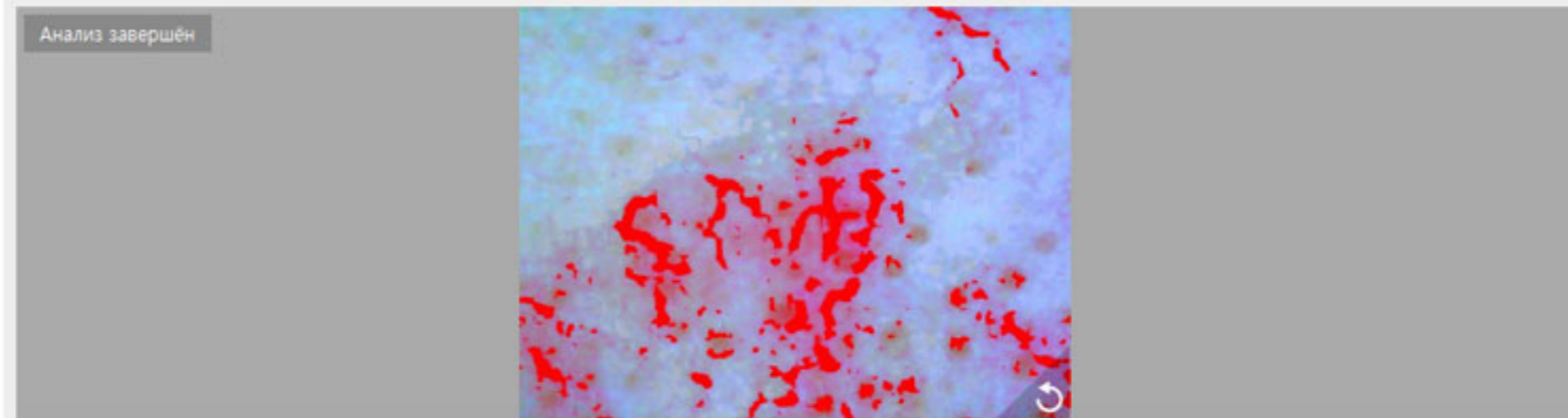

19

80

В среднем Клиент

Анализ

Снимок

3D

Сравнить



Чувствительность Результаты Интенсивный уход



Кожа чувствительна к любым физическим и химическим раздражителям.

Избегайте средств, в составе которых содержатся масла, а также физических воздействий на кожу.

Увлажнение ● Увлажнение : 19
Эластичность ● Эластичность : 17

Жирность ● U Зона : 1
 ● T Зона : 62



Хорошее ← | → Интенсивный уход

В среднем | Клиент | 30лет

| | | | |
|--|------------------|----|----|
| | Поры | 35 | 23 |
| | Пигментация | 32 | 23 |
| | Акне | 38 | 96 |
| | Морщины | 20 | 51 |
| | Чувствительность | 19 | 80 |



Клиент без регистрации
 30лет / Женский
 2018-02-02

Результаты "Увлажнение / Эластичность" Сухая / Низкая

Недостаток влаги по сравнению с той же возрастной группой.
 Кожа ощущается слегка стянутой, природная защитная плёнка становится тонкой из-за недостатка влаги. Увлажнить сухую кожу можно с помощью минеральной воды или правильного питьевого режима.


Отправить e-mail

Сохранить в HTML

РекомендуемыйПродукт



Пигментация ▾

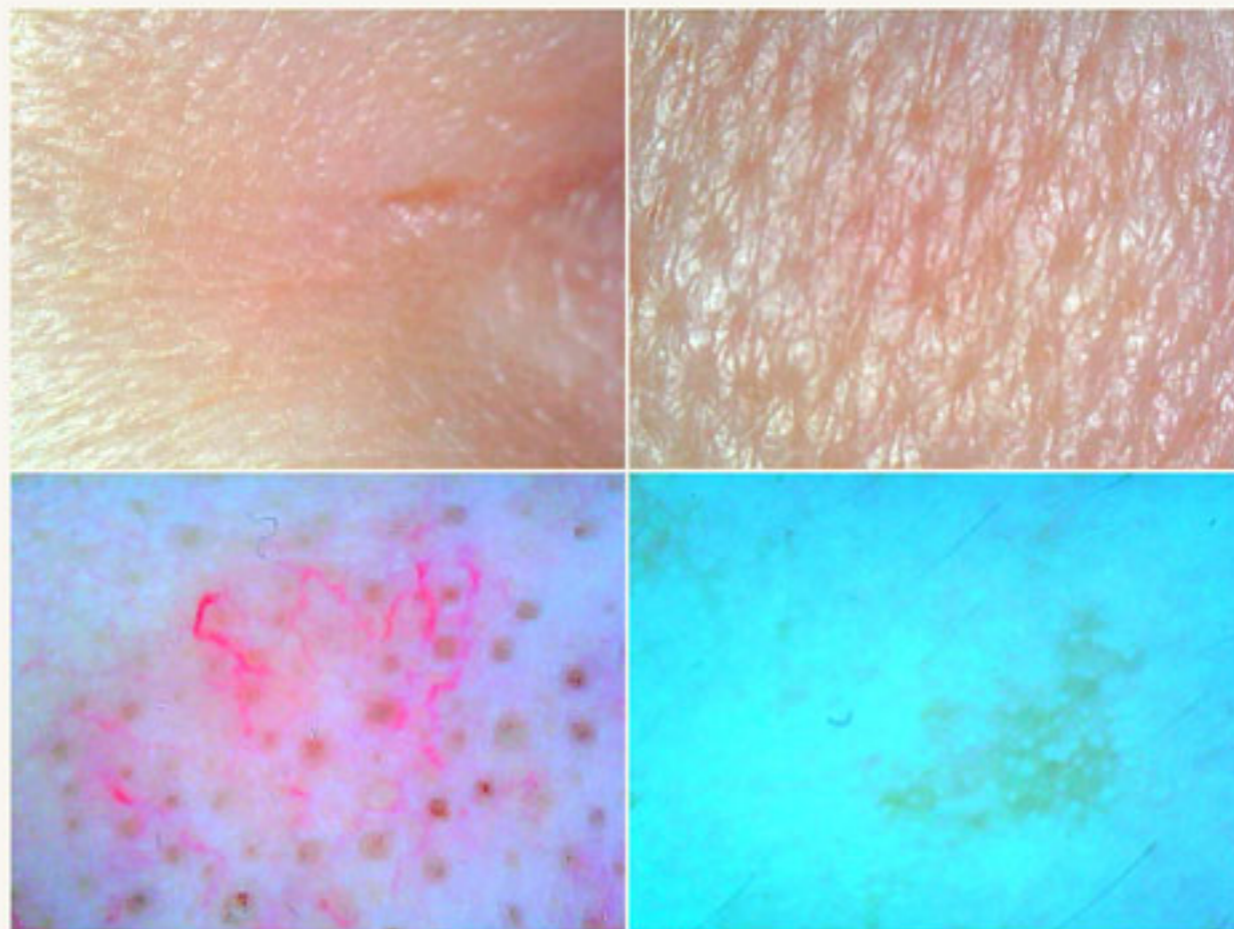

х30



Сохранить